


Схема проведения исследований при помощи набора SD BIOLINE TB Ag MPT 64


Процедура анализа для образцов, культивированных на плотной питательной среде



Конденсат из пробирок со скошенной агаровой средой

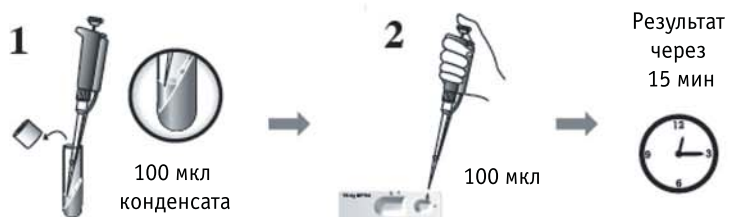

Процедура анализа для образцов, культивированных в жидкой питательной среде

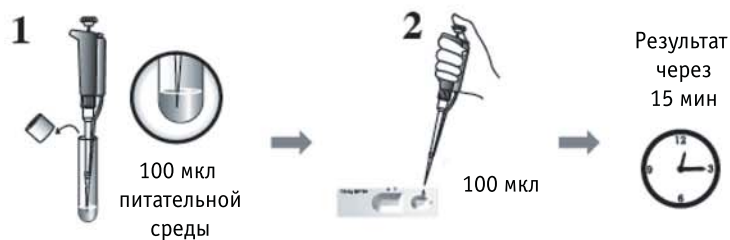

Интерпретация результатов

Отрицательный результат

Присутствие только одной контрольной полосы (С) в тестовом окне



Положительный результат

Присутствие двух окрашенных полос (Т и С) в тестовом окне



Неправильный результат

Отсутствие в тестовом окне контрольной полосы (С) указывает на неправильный результат. Рекомендуется протестировать образец повторно

