

Оптимизация оценки иммуноблотов для определения антител IgG к боррелиям и обновление программы EUROLineScan

Уважаемые коллеги,

Сообщаем об изменениях в наборах **Anti-Borrelia EUROLINE-RN-AT IgG (кат. номер DN 2131-3201 G)** и **Anti-Borrelia EUROLINE-WB IgG (кат. номер DY 2131-1601-1 G)**. Для этих наборов были изменены критерии оценки результата: те результаты, которые раньше относились к пограничным, теперь классифицируются как отрицательные (см. табл. ниже). В связи с исключением пограничных результатов, стало возможным четкое разграничение между серопозитивными и серонегативными образцами. Вышеуказанные изменения будут сопровождаться обновлением программного обеспечения **EUROLineScan до версии 3.4.5.**

Мы рекомендуем устанавливать новую версию программы **EUROLineScan 3.4.5** только после того, как будут израсходованы старые лоты наборов. Это гарантирует непрерывную оценку результата в соответствии с инструкцией, прилагаемой к набору. Новый лот будет поставляться с **1 апреля 2014 года** и на начальном этапе маркироваться наклейками красного цвета.

Для обновления/установки ПО EUROLineScan 3.4.5 необходимо выполнить следующие действия:

- при установке с CD стартовое меню откроется автоматически
- при установке вручную: открыть файл "Splash.exe"
- программа автоматически распознает, установлена ли на ПК предыдущая версия программы: для установки нажмите «Install», для обновления версии - "Perform update".
- проверьте, правильно ли указан путь к папке, в которой будет храниться программа ("EUROLineScan installation path") и после этого нажмите "Next" для начала установки.

Для более подробной информации об установке обратитесь к инструкции пользователя (глава 3.1.).

Обратите внимание! Использование ПО EUROLineScan невозможно на ПК с операционными системами старше, чем *Windows XP*.

Напоминаем, что программа EUROLineScan является бесплатной и поставляется нашим клиентам, которые пользуются блотами фирмы EUROIMMUN AG. Для использования программы требуется персональный компьютер и обычный планшетный сканер формата А4. Мы рекомендуем приобретать сканеры фирмы Canon, версии CanoScanLide 100, CanoScanLide 110, CanoScanLide 200, CanoScanLide 210 и более ранние. Эти сканеры прошли успешную апробацию у нас и у наших клиентов.

Программа предназначена для автоматической оценки проинкубированных стрипов и позволяет получать полуколичественный результат, распечатывать стандартные оценочные протоколы общим списком и отдельно по каждому пациенту. Программа полностью русифицирована.

Первичным пользователям высылается CD с программой, подробная инструкция по установке на русском языке, необходимые расходные материалы (зеленая бумага и клейкая пленка, используемые при оценке результатов) и калибровочный шаблон.

Если Вы уже являетесь пользователем программы, для Вас будет доступно скачивание новой версии с нашего сайта.

Более подробная информация размещена на сайте <http://analytica.ru/>, в разделе **Инфоцентр**, в подразделе **Новости**.

Для получения подробной информации обращайтесь в отдел продукции, к старшему специалисту по продукции Бородулиной Надежде: тел. 737-03-63, доб. 257.

Изменение для набора Anti-Borrelia EUROLINE-RN-AT IgG (кат. номер DN 2131-3201 G)

Текущие критерии оценки:

Результат по антителам		Полосы специфических антигенов: p18, p19, p20, p21, p58, OspC (p25), p39, p83, липид Bb, липид Ba		
		2 положительные полосы или более	1 положительная полоса	Нет положительных полос
Полосы VlsE Ba или VlsE Bb или VlsE Bg	Положительная	положительный	положительный	положительный
	Слабая	положительный	положительный	пограничный
	Отрицательная	положительный	пограничный	отрицательный

Новые критерии оценки:

Результат по антителам		Полосы специфических антигенов: p18, p19, p20, p21, p58, OspC (p25), p39, p83, липид Bb, липид Ba		
		2 положительные полосы или более	1 положительная полоса	Нет положительных полос
Полосы VlsE Ba или VlsE Bb или VlsE Bg	Положительная	положительный	положительный	положительный
	Слабая	положительный	положительный	отрицательный
	Отрицательная	положительный	отрицательный	отрицательный

Изменение для набора Anti-Borrelia EUROLINE-WB IgG (кат. номер DY 2131-1601-1 G)

Текущие критерии оценки:

Результат по антителам		Полосы специфичных антигенов из цельного экстракта: p83, p 39, p31, p30, OspC (p25), p21, p19, p17		
		2 положительные полосы или более	1 положительная полоса	Нет положительных полос
Полоса антигена VlsE	Положительная	Положительный	Положительный	Положительный
	Слабая	Положительный	Положительный	пограничный
	Отрицательная	Положительный	пограничный	Отрицательный

Новые критерии оценки:

Результат по антителам		Полосы специфичных антигенов из цельного экстракта: p83, p 39, p31, p30, OspC (p25), p21, p19, p17		
		2 положительные полосы или более	1 положительная полоса	Нет положительных полос
Полоса антигена VlsE	Положительная	Положительный	Положительный	Положительный
	Слабая	Положительный	Положительный	Отрицательный
	Отрицательная	Положительный	Отрицательный	Отрицательный