



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНАЛИТИКА»

129343, г. Москва, пр. Серебрякова, д. 2, корп. 1 Телефоны: (495) 737 0363, 748 1169, (800) 200 1989
Факс: (495) 737 0365 Почта: 129343, г. Москва, а/я 93 E-mail: info@analytica.ru Сайт: www.analytica.ru
ОКПО 06906003 ОГРН 1027739046796 ИНН 7716010122 КПП 771601001
Р/с 40702810938090001544 в ПАО Сбербанк г. Москва К/с 30101810400000000225 БИК 044525225

02.03.2020

№ б/н

Всем заинтересованным лицам

На №

от

Уважаемые клиенты и партнеры!

ЗАО «АНАЛИТИКА», официальный поставщик продукции Sentinel CH. S.p.A. (Италия), информирует вас, что для нескольких лотов контрольного материала Immuno Control Set (2 levels) (кат.№ 11211A), а также калибраторов Plasmaproteins Calx (кат.№ 11200D) и Plasmaproteins Cal 3x (кат.№ 11206D) производителем были уточнены аттестованные значения для трёх турбидиметрических тестов. Новые значения приведены в таблицах:

Immuno Control Set (2 levels) (кат.№ 11211A)		Новое аттестованное значение / <i>прежнее значение</i>		
Лот (срок годности)	Компонент набора (уровень)	Haptoglobin, mg/dl	Alpha 1-Acid Glycoprotein, mg/dl	Alpha 1-Antitrypsin, mg/dl
Lot 80412 (Exp Date 06-2021)	G0551	56±14 / 37±9	41±10 / 37±9	65±16 / 85±21
	G0552	159±40 / 114±29	126±32 / 114±29	200±50 / 219±55
Lot 90125 (Exp Date 06-2021)	G0551	56±14 / 37±9	41±10 / 37±9	65±16 / 85±21
	G0552	159±40 / 114±29	126±32 / 114±29	200±50 / 219±55
Lot 90308 (Exp Date 06-2021)	G0551	56±14 / 42±10	41±10 / 37±9	65±16 / 85±21
	G0552	159±40 / 120±30	126±32 / 114±29	200±50 / 219±55

Лот (срок годности)	Новое аттестованное значение / <i>прежнее значение</i>		
	Haptoglobin, mg/dl	Alpha 1-Acid Glycoprotein, mg/dl	Alpha 1-Antitrypsin, mg/dl
Plasmaproteins Calx (кат.№ 11200D)			
Lot 80377 (Exp Date 05-2020)	154 / 112	91 / 91	163 / 208
Lot 90362 (Exp Date 04-2021)	148 / 107	85 / 88	157 / 197
Plasmaproteins Cal 3x (кат.№ 11206D)			
Lot 80440 (Exp Date 05-2020)	322 / 224	198 / 182	337 / 417
Lot 90372 (Exp Date 04-2021)	298 / 213	201 / 176	350 / 394

Изменения коснулись только вышеуказанных тестов, для всех других тестов аттестованные значения не изменились.

Приносим извинения за доставленные неудобства и просим известить заинтересованных специалистов. По всем вопросам просьба обращаться в отдел продукции ЗАО «АНАЛИТИКА».

Начальник отдела продукции

А.В. Багаев