


ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ



Габариты: 24x42x20 см. Вес 5,8 кг

EasyLyte Na·K EasyLyte Plus Na·K·Cl EasyLyte Calcium Na·K·Ca·pH EasyLyte Expand Na·K·Cl·Ca

- Производитель Medica (США)
- Анализ за 1 минуту
- 100 мкл плазмы, сыворотки или цельной крови
- Забор пробы из пробирки или шприца
- Автоматическая калибровка
- Средняя продолжительность работы электродов 12 мес.*
- Все рабочие растворы и емкость для отходов находятся внутри сменного пака
- Встроенный термопринтер
- Возможность подключения автоподатчика проб

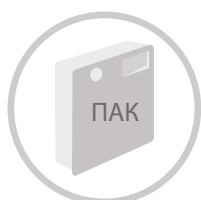

**ПАКОВАЯ
РЕАГЕНТНАЯ
СИСТЕМА**



**НИЗКАЯ
ЦЕНА
АНАЛИЗА**



**УПРАВЛЕНИЕ
ДВУМЯ
КНОПКАМИ**

БОЛЕЕ 1700 УСТАНОВЛЕННЫХ АНАЛИЗАТОРОВ ПО ВСЕЙ РОССИИ

**РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВЗЯТИЯ КРОВИ:
С ЛИТИЕВОЙ ИЛИ НАТРИЕВОЙ СОЛЬЮ ГЕПАРИНА**, С УСКОРИТЕЛЕМ СВЁРТЫВАНИЯ**

** Гепарин – единственный антикоагулянт, рекомендованный при выполнении анализов на электролиты. ЭДТА или цитрат калия могут значительно повлиять на результат. Состояние и концентрация гепариновой соли становятся важными из-за иондобавляющих свойств гепарина.

* Статистические данные сервисного центра ЗАО «АНАЛИТИКА»



ЗАО «АНАЛИТИКА»

Москва, пр-д Серебрякова, д.2, к.1
+7 495 748 1339, +7 800 200 1989
vet@analytica.ru vet.analytica.ru

ЗАО «АНАЛИТИКА» - авторизованный представитель
компании Medica Corporation (США) с 1998 года в РФ

25.06.19

ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ




Программное обеспечение прибора отмечает результаты проб, выходящие за пределы нормального диапазона, контролирует весь процесс работы и рассчитывает параметры контроля качества

	Референсные значения определяемых аналитов (ммоль/л)			
	Na ⁺	K ⁺	Cl ⁻	Ca ⁺
Собака	145,0 – 155,0	2,70 – 5,00	96,0 – 122,0	1,12 - 1,46
Кошка	143,0 – 156,0	3,50 – 5,20	108,0 – 128,0	1,15 - 1,32
Лошадь	137,0 – 148,0	2,80 – 5,10	99,0 – 109,0	1,25 - 1,75
Корова	143,0 – 151,0	4,10 – 5,30	97,0 – 111,0	1,16 - 1,33
Свинья	135,0 – 150,0	4,40 – 6,70	94,0 – 106,0	1,25 - 1,38

Референсные значения для ионизированного кальция взяты из научных публикаций

Алгоритм работы прибора

ПРОСТО И УДОБНО

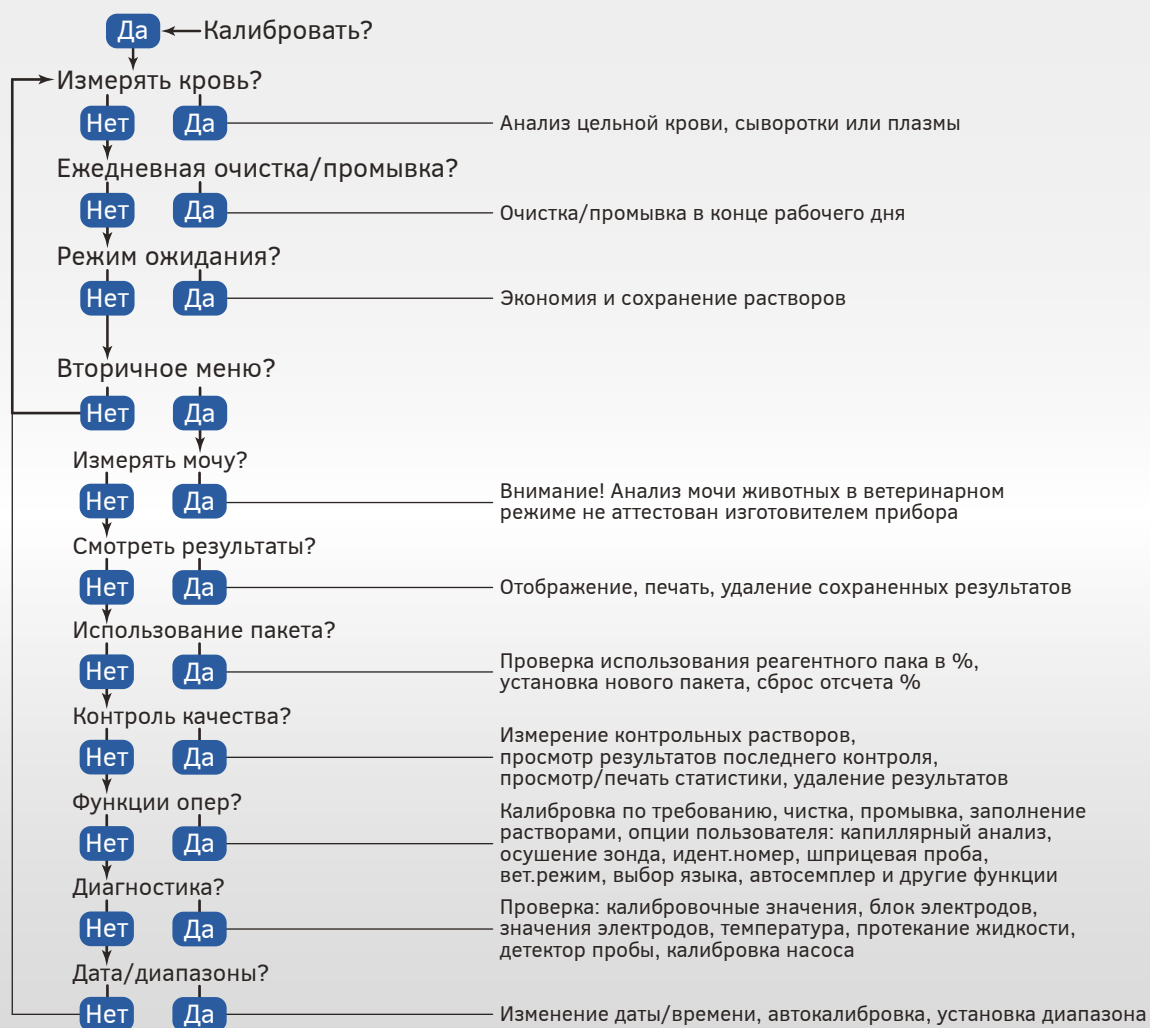

ЗАО «АНАЛИТИКА»

Москва, пр-д Серебрякова, д.2, к.1
+7 495 748 1339, +7 800 200 1989
vet@analytica.ru vet.analytica.ru

ЗАО «АНАЛИТИКА» - авторизованный представитель компании Medica Corporation (США) с 1998 года в РФ